

Collier cervical semi rigide

Caractéristiques : Le collier semi rigide, soutien moyen, se compose d'une mousse à haute densité dans laquelle est insérée une plaque rigide.

Le collier est recouvert d'une housse en jersey coton.

Composition : Mousse de polyuréthane, PE, coton.

Indications : Soutien moyen pour cervicalgies aiguës (torticolis, arthrose...) et traumatismes cervicaux sans gravité. (Entorses bénignes...).

Précautions : Ce collier ne doit pas être en contact avec une plaie non protégée. Il doit être utilisé le temps de la prescription médicale. Veillez à ne pas serrer le collier excessivement.

Tailles et prises de mesures : Mesurer le tour du cou en cm et se référer au tableau des tailles sur l'emballage.

Méthode de pose :

La pose est faite sous la responsabilité du praticien. Adapter le collier autour du cou du patient, puis verrouiller à l'aide du velcro sur la nuque.

Entretien : Laver à la main avec de l'eau froide et du savon doux, puis rincer intégralement. Laisser sécher à l'air libre. Si le rinçage est insuffisant, le savon résiduel risque d'irriter la peau du patient et de détériorer le matériau.

Importé par :



153, Rue Pierre Corneille 69003 LYON