

Collier cervical souple

Caractéristiques : Collier cervical pour soutien léger (C1), composé d'une mousse polyuréthane de 30Kg/m³.

Composition : mousse PU, coton

Indications : Immobilisation légère pour cervicalgies aiguës. (Torticolis, arthrose,...)

Précautions : Veillez à ce que le collier ne soit pas trop haut afin de ne pas blesser le patient, le collier ne doit pas être en contact avec une plaie non protégée.

Méthode de pose :

La pose est faite sous la responsabilité du praticien.

Le collier s'adapte autour du cou du patient et se verrouille par velcro sur la nuque.

Tailles et prises de mesures : Mesurer le tour de cou en cm.

Entretien : Laver à la main avec de l'eau froide et du savon doux, puis rincer intégralement. Laisser sécher à l'air libre. Si le rinçage est insuffisant, le savon résiduel risque d'irriter la peau du patient et de détériorer le matériau.

Importé par :



153, Rue Pierre Corneille 69003 LYON